

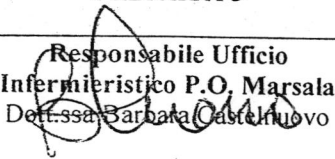
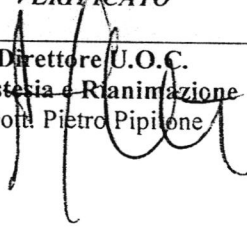

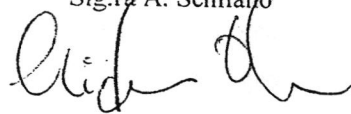
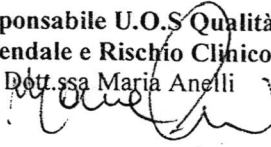
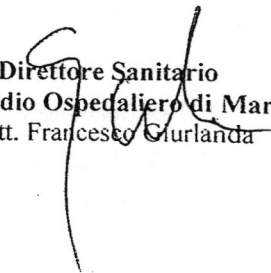
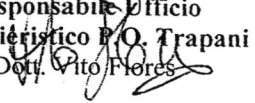
<p>PROCEDURA GESTIONALE DI SISTEMA</p> <p>GESTIONE DEL CARRELLO PER L'EMERGENZA PRESIDIO OSPEDALIERO PAOLO BORSELLINO MARSALA</p> <p>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI</p>	 <p>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</p> <p>Via Mazzini 1, 91100 Trapani</p>	<p>Codice del documento: PRG.036.DrQr</p> <p>Data di emissione: 20.02.2020</p> <p>N° di revisione: 0</p> <p>Data di revisione:</p> <p>Pagina 1 di 53</p>
---	--	--

TIPO DI DISTRIBUZIONE

- CONTROLLATA
- NON CONTROLLATA

**PROCEDURA GESTIONALE DI SISTEMA:
PRG.036.DrQr**

**LA GESTIONE DEL CARRELLO PER L' EMERGENZA
PRESIDIO OSPEDALIERO PAOLO BORSELLINO
MARSALA**

<i>PREPARATO</i>	<i>VERIFICATO</i>	<i>APPROVATO</i>
<p>Responsabile Ufficio Infermieristico P.O. Marsala Dott.ssa Barbara Castelnovo</p> 	<p>Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione Dott. Pietro Pipitone</p> 	<p>Direttore Sanitario Aziendale Dott. Gioacchino Oddo</p> 
<p>CPS/Inf. Coordinatore U.O.C. Anestesia Rianimazione Sig.ra A. Schifano</p> 	<p>Responsabile U.O.S. Qualità Aziendale e Rischio Clinico Dott.ssa Maria Anelli</p> 	<p>Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Marsala Dott. Francesco Giurlanda</p> 
	<p>Referente Qualità Aziendale Responsabile Ufficio Infermieristico P.O. Trapani Dott. Vito Flores</p> 	

<p>PROCEDURA GESTIONALE DI SISTEMA</p> <p>GESTIONE DEL CARRELLO PER L'EMERGENZA PRESIDIO OSPEDALIERO PAOLO BORSELLINO MARSALA</p> <p>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI</p>	 <p>Via Mazzini 1, 91100 Trapani</p>	<p>Codice del documento: PRG.036.DrQr</p> <p>Data di emissione: 20.02.2020</p> <p>N° di revisione: 0</p> <p>Data di revisione:</p> <p>Pagina 2 di 52</p>
---	---	---

SOMMARIO

1. Scopo	pag. 4
2. Campo di applicazione	pag. 4
3. Lista di distribuzione	pag. 5
4. Tavola degli aggiornamenti	pag. 6
5. Matrice delle responsabilità	pag. 6
6. Abbreviazioni	pag. 6
7. Cartellonistica	pag. 7
8. Struttura	pag. 7
8.1 Modello Francehopital	pag. 8
8.2 Modello FS	pag. 9
8.3 Modello Bailida Vincal	pag. 10
8.4 Modello Luxor	pag. 11
8.5 Modello CFS Terapia	pag. 12
9. Dotazione/checklist	pag. 13
9.1 Dotazione strumentale	pag. 13
9.2 Presidi e Farmaci	pag. 13
9.3 Precauzioni	pag. 14
10. Controlli/ Modalità Check Control	pag. 14
10.1 Defibrillatore modello Lifepak 20	pag. 15
10.2 Defibrillatore modello Esaote Mdf	pag. 15
10.3 Defibrillatore modello Schiller Defigard	pag. 15
10.4 Defibrillatore modello Mindray Beneheart d3	pag. 15
10.5 Test aspiratore	pag. 15
10.6 Controlli Tecnici	pag. 15
11. Descrizione delle attività	pag. 16
11.1 controllo giornaliero/sett.	pag. 17
11.2 controllo mensile	pag. 17
11.3 ripristino dopo l'uso e se occorre	pag. 17
12. Non conformità	pag. 18
13. Istruzioni alla compilazione	pag. 18